

Biguanelle®

isotonische gynäkologische Lösung
- Zuverlässige Behandlung von
Vaginalinfektionen



Tipps

Befolge immer den Rat deines Arztes. Darüber hinaus finden einige Frauen die folgenden Tipps hilfreich:



Übe **festen Druck** aus: Drücke die Flasche fest zusammen, um die Flasche vollständig zu entleeren. Wir empfehlen die Anwendung im Liegen.



Verwende Biguanelle® Lösung direkt vor dem Schlafengehen, so dass du nach der Anwendung einige Minuten liegen bleiben kannst. So hat die Lösung mehr Zeit, um die Innenwände der Vagina zu benetzen.




Wir empfehlen dir ein Handtuch oder ein wasserdichtes Tuch unter dich zu legen, um überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen.



Führe den gesamten Inhalt der Flasche bei einer einzigen Anwendung in die Vagina ein. Biguanelle® wirkt auf verschiedene Weise, unter anderem durch einen mechanischen Reinigungseffekt. Daher ist es wichtig, die gesamte Lösung zu verwenden.



Bei Fragen zur Dosierung, Verabreichungsform oder zu den Produkteigenschaften wende dich bitte an deine Apotheke oder an eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

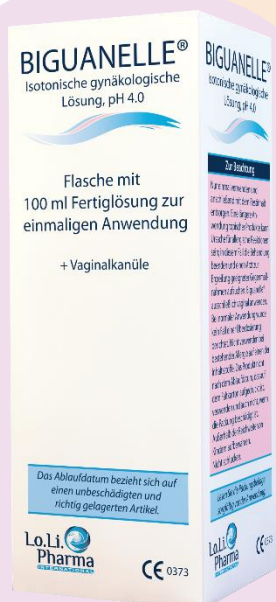

Biguanelle® Lösung Anwendungsgebiet

- Behandlung einer Scheideninfektion jeglicher Herkunft und Art durch Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der physiologischen Bedingungen der Vaginalflora.
- Bei physikalischen Behandlungen (wie z. B. Lasertherapie oder Kryotherapie) zur Unterstützung der Wundheilung.



Dosierung und Verabreichung

- Einmalige Anwendung. Nach ärztlichem Rat kann eventuell eine wiederholte Anwendung nach vier Tagen erfolgen.

Biguanelle®

isotonische gynäkologische Lösung
- Zuverlässige Behandlung von
Vaginalinfektionen



Anwendung

1 Wasche dir zunächst die Hände.




2 Knicke oben den Sicherheitsverschluss vorsichtig zur Seite ab.



3 Nimm die Kanüle aus der Schutzhülle, führe sie in die Flasche ein, bis sie sicher und stabil sitzt.



4 Finde eine bequeme Position, um das Spülen durchzuführen. Die meisten Frauen bevorzugen das Sitzen mit angewinkelten Knien auf einer weichen Unterlage.*

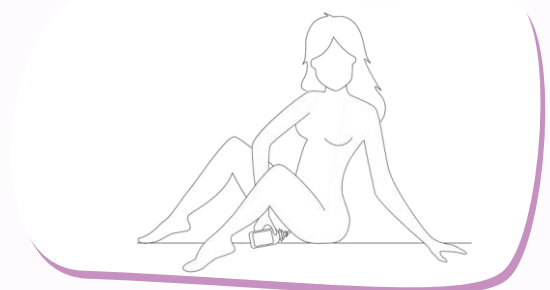

5 Führe die Kanüle etwa zur Hälfte vorsichtig in die Vagina ein. Drücke die Flasche zusammen, bis sie vollständig entleert ist.



6 Belasse die Lösung für einige Minuten in der Vagina, damit sie ihre Wirkung vollständig entfalten kann. Wundere dich nicht, wenn dennoch Flüssigkeit wieder herausfließt. Das ist normal.

Befolge eventuelle Anweisungen des Arztes.



***Tipp:** Leg ein Handtuch unter das Gesäß, da ein Teil der Vaginallösung wieder herausläuft. Aber keine Sorge, es verbleibt genug Lösung im Inneren, um zu wirken.